

# VACCINATOR

ONDERDELEN + GEBRUIKSAANWIJZING

## Onderdelen



Vaccinator



Rode doseersleutel



Steripomp

## Gebruiksaanwijzing

1. Breng de rode doseersleutel aan op de vaccinator. In de standaard hangpositie (rechts van de zwarte cilinder) is het doseervolume 2.0 ml.



2. Om een kleinere dosering in te stellen (1.5, 1.0 of 0.75 ml) moet de doseersleutel tussen het handvat en de zwarte cilinder worden geplaatst. De doseerhoeveelheid staat op de sleutel. Doseerhoeveelheid op afbeelding komt overeen met 1.5 ml.



**Heberex**


Violenstraat 10, 7731 WN Ommen

Tel: 0529 466 675 E-mail: [info@heberex.nl](mailto:info@heberex.nl) Website: [www.heberex.nl](http://www.heberex.nl)

# VACCINATOR

## ONDERDELEN + GEBRUIKSAANWIJZING

3. Haal de steripomp uit de verpakking en plaats hem voor op de vaccinator. De steripomp moet worden doorgedrukt totdat het zwarte bolvormig punt in de zuiger klikt. Vervolgens moet de steripomp in de vergrendeling worden gedraaid.

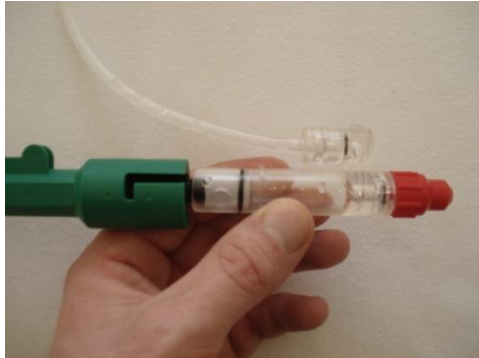

4. Prik de aanzuigslang in de medicijnfles.



5. Plaats de medicijnfles op de houder.



### Heberex


Violenstraat 10, 7731 WN Ommen

Tel: 0529 466 675 E-mail: [info@heberex.nl](mailto:info@heberex.nl) Website: [www.heberex.nl](http://www.heberex.nl)


# VACCINATOR

## ONDERDELEN + GEBRUIKSAANWIJZING

6. Plaats de naald op de steripump.

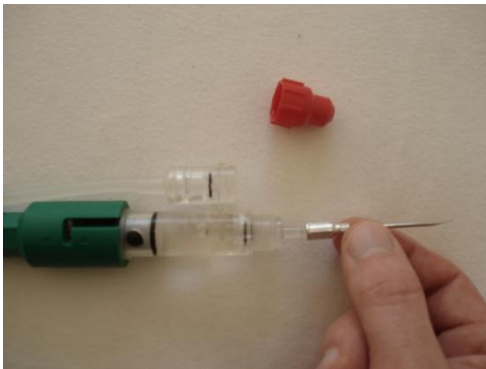

7. Vergrendel de naald met behulp van de rode draaidop.

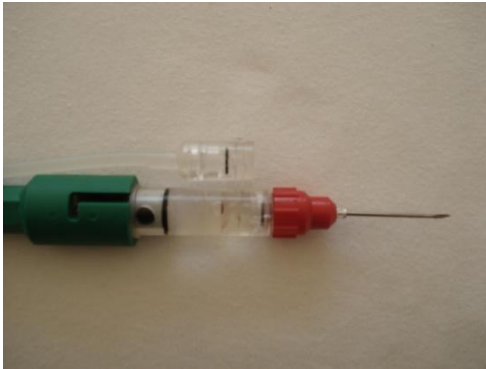

8. Gebruik de achterkant van de doseersleutel om eventueel vastzittende naalden van de steripump af te draaien



**Heberex**

Violenstraat 10, 7731 WN Ommen

Tel: 0529 466 675 E-mail: [info@heberex.nl](mailto:info@heberex.nl) Website: [www.heberex.nl](http://www.heberex.nl)